


# SOUYI®

品番：SY-081-N  
取扱説明書  
[保証書付]

## アクティブ・パッド EMS

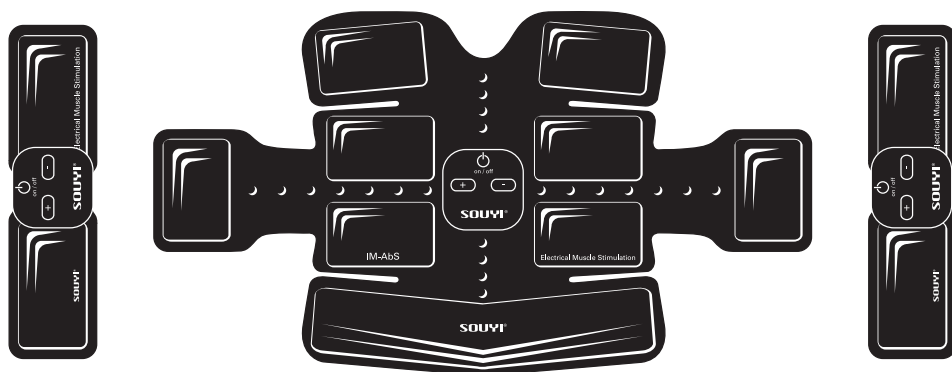

この度はSouyi®「アクティブ・パッドEMS」をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分に理解された上で、事故が起こればように記載内容に従って正しくご使用願います。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因となりますので、業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。

### 目次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ● 安全上のご注意 [必ずお守りください] ..... | 1  |
| ● 各部の名称・付属品 .....           | 3  |
| ● 使用上のご注意 .....             | 4  |
| ● ジェルパッドの取り扱い方法 .....       | 4  |
| ● ご使用前の準備 .....             | 5  |
| ● 本体操作とEMSレベルについて .....     | 6  |
| ● 本製品の使い方の目安と身体の部位 .....    | 8  |
| ● お手入れ方法 .....              | 10 |
| ● 保管方法 .....                | 11 |
| ● 廃棄方法 .....                | 11 |
| ● Q&A .....                 | 12 |
| ● 故障かな?と思ったら .....          | 13 |
| ● 製品仕様 .....                | 14 |
| ● 別売品 .....                 | 14 |

## 安全上のご注意 [必ずお守りください]

### 安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因となります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

### 警告



分解  
禁止

修理技術者以外の人は、絶対に改造、分解、修理をおこなわない

- 発火や異常動作によるけがの恐れがあります。  
※修理はお買上げの販売店にてご相談ください。



禁止

本体を丸洗いしたり、水に浸けたり、水や熱湯をかけたりしない

- ショートによる感電や変形の原因になります。

### 警告



次のような方は使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・心臓疾患のある方    ・妊娠中の方、出産直後の方



次のような部位には使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・胸部および肩甲骨などの心臓の周辺部位や首から上の部位（頭、顔など）
- ・傷口や目、口、陰部などの粘膜部位
- ・当日、脱毛処理をした部位
- ・整形手術をした部位
- ・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- ・背骨（脊椎）
- ・刺青（タトゥー）を入れている部位
- ・生理中の腹部

本書で指定している部位以外には使用しないでください



・小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方は使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- ・分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- ・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
- ・電極部に金属を接触させないでください。感電のおそれがあります。
- ・他の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこすおそれがあります。

## 警告



次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。  
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- ・アレルギー体質の方
- ・皮膚に知覚障害や異常（感染症、皮膚炎や傷など）のある方
- ・血行障害のある方
- ・薬を服用中の方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
- ・発熱（38℃以上）している方
- ・安静を必要とする方
- ・骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- ・ジェルパッドが肌に合わない方
- ・特に身体に異常を感じている方
- ・その他医療機関で治療中の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

## 注意



- ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- ・本品から異臭、異音がする場合、または内部に水などの異物が入り込んだ場合は、ただちに電源を切り使用をやめてください。ショートや故障、発火のおそれがあります。
- ・ジェルパッドは他の人と共有しないでください。感染症のおそれがあります。



ジェルパッドを取り扱うときは、次のことを守ってください。  
痛みややけどのおそれがあります。

- ・破損や劣化したり、汚れたジェルパッドは使用しないでください。
- ・ジェルパッドは曲げたり折ったりしないでください。ジェルパッドが破損します。
- ・ジェルパッドは皮膚に密着させてください。貼った部分に隙間があると、ジェルパッド全面で電気が均一に流れないため、刺激を強く感じる場合があります。
- ・ジェルパッドを取り外すときは本品の電源を切ってください。
- ・必ず電極部にジェルパッドを貼って使用してください。電源が入っているときは、電極部を直接触らないでください。



次の注意事項を守って、使用してください。事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがあります。

- ・本体やジェルパッドを電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- ・用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- ・小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- ・本体に液体をこぼさないでください。
- ・運動中や自動車などの運転中は使用しないでください。
- ・浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。

## 危険




次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。  
事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。


- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器

## 各部の名称・付属品



アブス10極パッド(表)

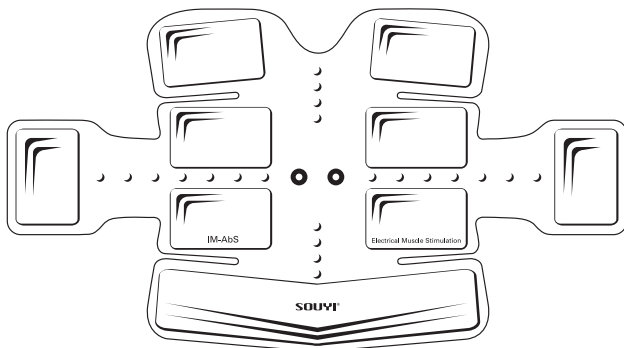


シングル2極パッド(表)  
[×2個]

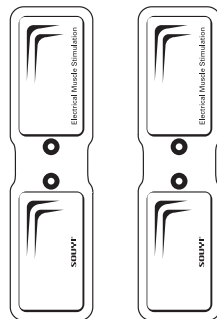


本体  
[×3個]

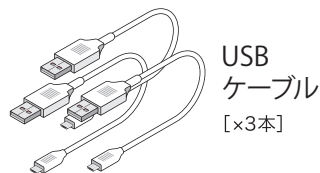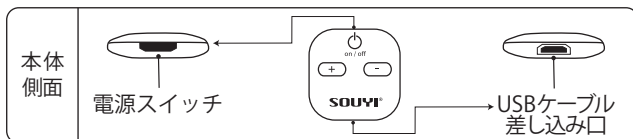

アブス10極パッド(裏)

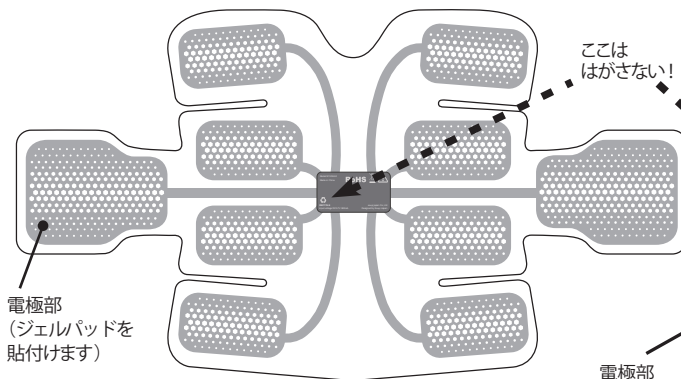

シングル2極パッド(裏)

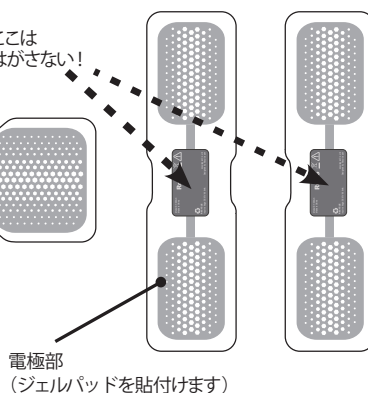

### 付属品

- ・取扱説明書(本書)＝1冊
- ・専用貼り付け用ボード＝1枚
- ・高電導ジェルパッド＝本体専用PAD14枚(大2枚、小12枚)
- ・充電用USBケーブル＝3本
- ・本体3個
- ・収納袋＝1枚

※ジェルパッドは消耗品です。粘着面(ジェル面)が傷んだときは、別売品をお求めください。詳細は、P14「消耗品」を参照ください。

【ジェルパッド公式販売サイト】  
ご購入はこちらのQRコードから



## 使用上のご注意

本製品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。



- ・使用する部位に本体を貼り付けてから、電源を入れてください。使用後は必ず電源を切ってから本体を身体から剥がしてください。強い衝撃を受けるおそれがあります。
- ・身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となるおそれがあります。
- ・むやみに強くしたり、長時間使用すると、筋肉疲労や、皮ふの違和感、赤みの原因となるおそれがあります。
- ・本品を使用するときは、アクセサリ類（ネックレス、ピアス、ベルトなど）を外してください。事故やケガ、破損などのおそれがあります。
- ・使用中に電子機器（腕時計、歩数計、携帯電話など）を本体に近付けしないでください。電子機器が誤作動するおそれがあります。

- ・使用の際は、化粧水やボディクリームなどを使用すると粘着が弱くなるおそれがあります。
- ・ご使用部位の体毛は処理されていたほうが、ジェルパッドがより良く肌に密着します。ただし、脱毛当日の使用はお控えください。
- ・変形などのおそれがあるため、冷やしたり、温めたりした状態で使用しないでください。また、熱湯をかけたり、サウナで使用したりなど本製品に急激な温度変化を与えるような使用はしないでください。
- ・使用する部位は清潔にしてください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。

## ジェルパッドの取り扱い方法

ジェルパッドは消耗品です。次のようなときは新品と交換してください。

- ・開封後1ヶ月以上経過したもの、またはご使用回数（肌への着脱）が30回程度になったとき
- ・粘着力の低下、粘着面（ジェル面）の乾燥・えぐれや取り除けない汚れなどが生じたとき
- ・詳しくはP14「別売品」を参照してください。

ジェルパッドを取り扱うときのご注意

- ・直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
- ・ジェルパッドを放置したり、汚れが付着したものと一緒に保管したりしないでください。ジェルパッドに汚れがつくと粘着力や電気刺激が低下したり、痛みややけどをおこしたりするおそれがあります。
- ・お手入れの頻度や肌の状態、保管状態などによっては、ジェルパッドが15～25回で剥がれやすくなる場合がありますが、お手入れすることで長持ちします。詳しくは、P10「お手入れ方法」を参照してください。
- ・誤って衣服などに貼り付いたときは、無理に剥がさず、ジェルパッドが貼り付いた衣服の裏側からわずかな水で湿らせると、簡単に剥がれます。

## ご使用前の準備



- ・破損や劣化していたり、汚れたジェルパッドは使用しないでください。やけどのおそれがあります。
  - ・必ず本体はアブス10極パッド・シングル2極パッドのいずれかに装着してから電源を入れてください。
- 電源が入った状態で本体裏の金属部分を触るとビリビリと痛みを感じるおそれがあります。
- ・必ず全ての電極部にジェルパッドを貼り付けてください。電極部が肌に当たると痛みややけどのおそれがあります。
- ※間違った方法で貼り付けると、肌への粘着が弱くなり、正しく機能しなかったり、使用目安よりも早く消耗する可能性があります。

### 1 本体を約1時間充電します。

※充電時は赤色LEDが点灯します。  
充電完了約1時間後に消灯します。



本体充電は出力1A以下の電源を使ってください。高出力の充電バッテリー等で充電すると故障の原因となります。

### 2 アブス10極パッド（シングル2極パッド）を平らなところ（机の上など）に裏面が見えるように置きます。

### 3 ジェルパッドを袋から取り出し、ジェルパッドに付いている保護フィルム（青色）を片方だけ先に剥がします。\*図1

### 4 ジェルパッド粘着面にできるだけ触れないように電極部にジェルパッドを半分貼り、その後もう片方の保護フィルム（青色）も剥がし残りの半分も貼ります。\*図2

※電極部を覆うようにしてジェルパッドを貼ってください。電極部が直接肌に触れると痛みを感じる場合があります。ご注意ください。

### 5 全てのジェルパッドを貼ります。

※気泡ができないように貼ってください。透明フィルムの上からジェルパッドを指の腹で押し空気を抜いてください。

### 6 アブス10極パッド（シングル2極パッド）を表面にして充電した本体をパッドの真ん中部分のホックにセットします。\*図3


※本体の文字が下になるように合わせ「カチッ」としっかりセットします。

### 7 アブス10極パッド（シングル2極パッド）を裏面にして、全てのジェルパッドの透明フィルムを剥がします。\*図4


※電極部に貼ったジェルパッドは新品と交換するときまで剥がさないでください。

### 8 準備完了。


(図1)

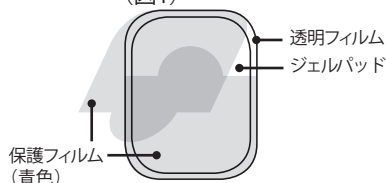


(図2)

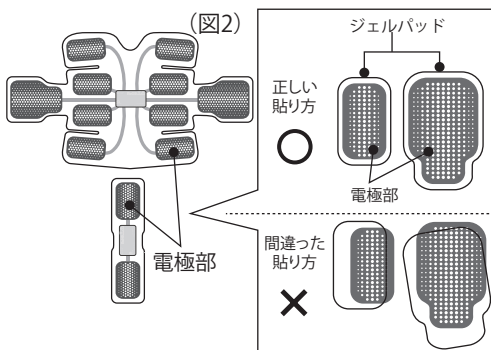

(図3)

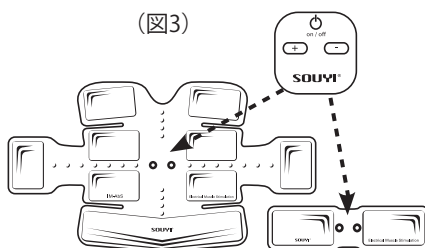


(図4)

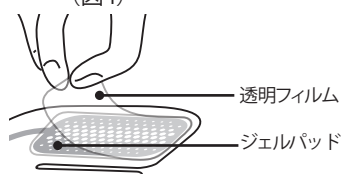

## 本体操作とEMSレベルについて

### トレーニングプログラム

- 効果的なトレーニングのために、体感が自動的に切り替わります。
- 開始から終了まで、約20分です。

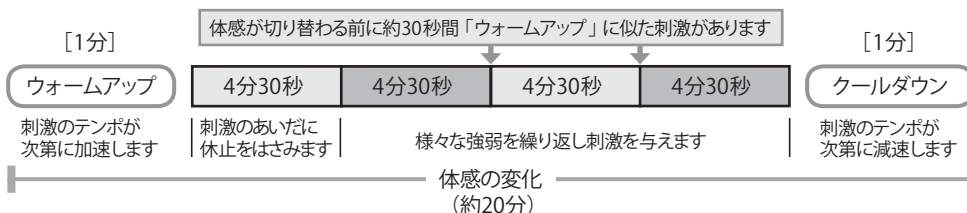


#### ご注意

- 刺激のレベルは全部で15段階（レベル1～15）あります。
- 初めてお使いになるときは弱いレベルに設定して使用してください。弱いレベルに慣れましたら、レベルの調節を行ってください。


## 1 電源を入れる。

#### ご注意

- 電源が入っている状態でジェルパッドが肌に密着していないと、「ピッ、ピッ」と警告音が鳴ります。そのままの状態が約1分続くと自動的に電源が切れます。

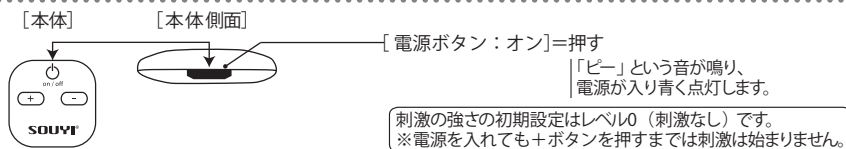


## 2 お好みで+と-でレベルを設定しEMS運動を開始する。

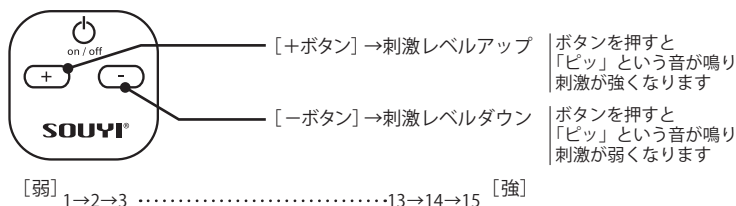

## 3 EMSは約20分動作して自動的に電源がoffに。

## 途中で電源を切る場合

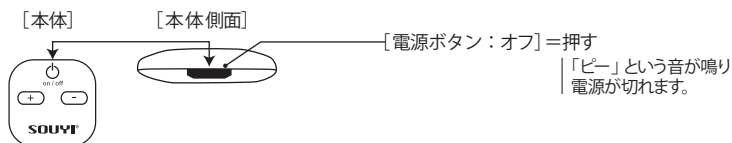


## 4 アブス10極パッド、シングル2極パッドを身体から剥がす。

- ・必ず電源を切ってから、本体を身体から剥がしてください。
- ・粘着面（ジェル面）はなるべく指で触らないでください。
- ・使用後は毎回、台紙に貼り付け、収納袋に入れてください。ジェルパッドにほこりなどが付着すると、粘着力や電気刺激が低下したり、痛みややけどをおこしたりするおそれがあります。詳しくはP.11「保管方法」を参照してください。
- ・肌にジェルのかけらが残った場合はきれいに取り除いてください。身体に貼り付けたままにしていると、肌荒れのおそれがあります。


### ●正しい剥がし方

図のように全体を持つようにしてゆっくりと剥がしてください。

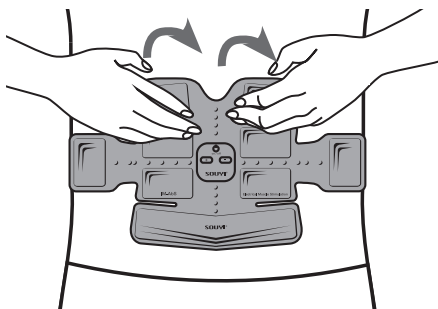

### ●誤った剥がし方

無理に引っ張ったり、一部だけを持って剥がそうとしたりしないでください。破損するおそれがあります。

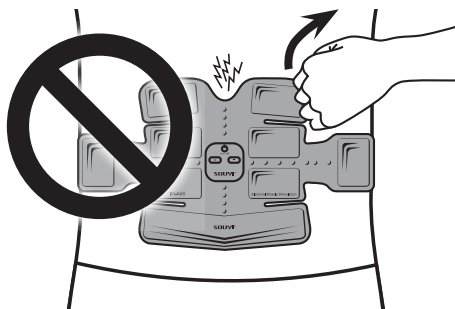



## 本製品の使い方の目安と身体の部位

### ご注意


ご使用の目安は下記のとおりです。

- ・使用箇所は1箇所につき、1日1回までとしてください。
- ・強度を下げれば使用可能回数が多くなり、強度を上げれば使用可能回数が少なくなります。
- ・本製品を初めて使用する際は必ずレベル1（強度を一番弱く）にして、*だんだん*と身体を慣らしてください。
- ・初めから強度を上げて使用すると運動による疲れを起こす原因となります。

### アブス10極/パッドを使用する部位


### 重要

- ・使用したい部位の汗を拭き取ってから貼り付けてください。
- ・粘着面（ジェル面）はなるべく指で触らないでください。
- ・ジェルパッドは肌に密着させてください。ジェルパッドと肌に隙間があると全面で電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。

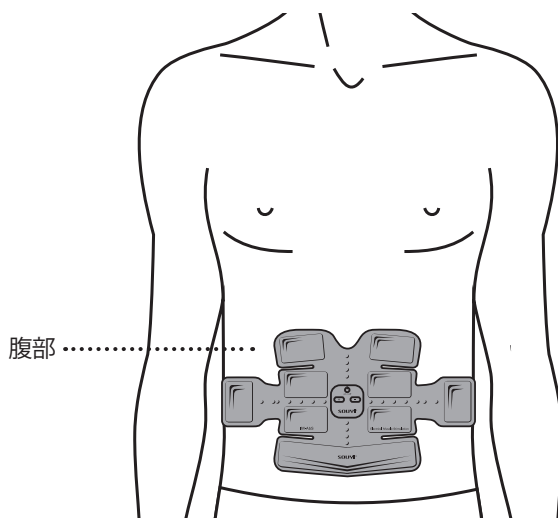

刺激を感じにくい場合は、本体を貼る位置を1～2センチずつ上下に移動させてください。  
貼る位置をかえる場合は、電源を切ってください。

## シングル2極パッドを使用する部位

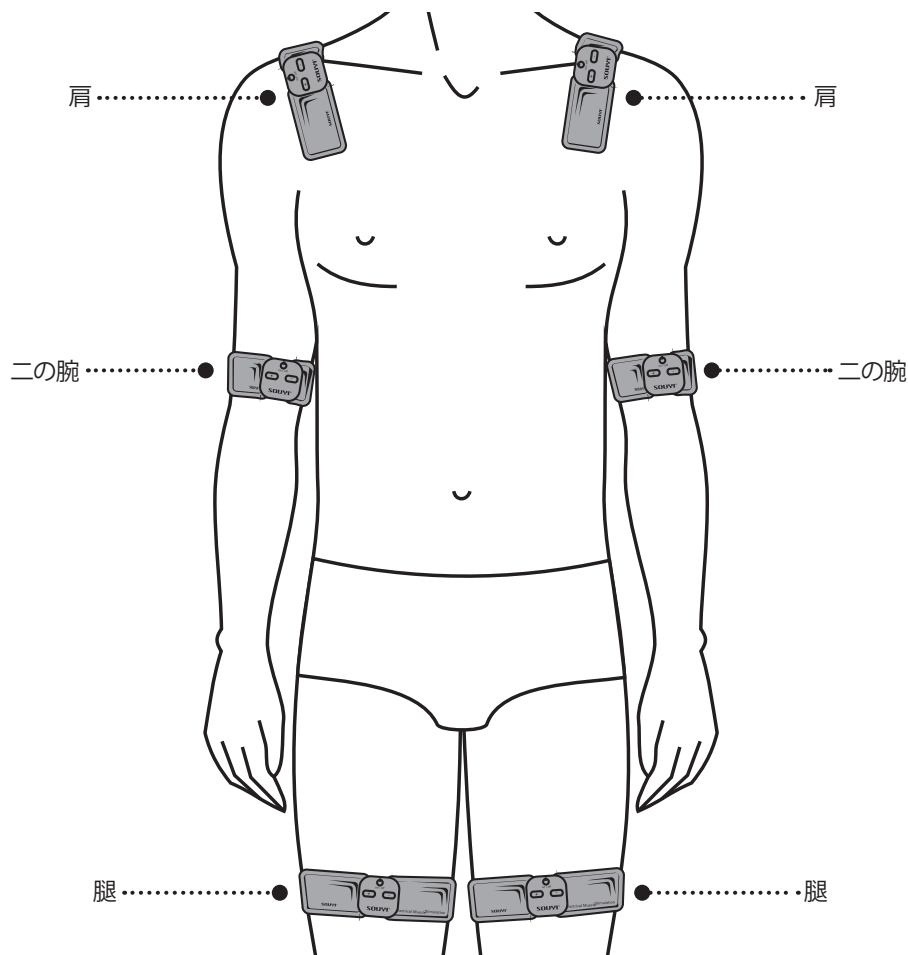

### ご注意

・二の腕は、比較的弱いレベルでもトレーニングすることができます。レベルを上げすぎないで使用してください。

### 重要

・シングル2極パッドを使用する時は必ず本体を取り付けてご使用ください。

## お手入れ方法



お手入れは、電源が切れていることを確認してから行ってください。電源が入ったままお手入れすると、衝撃などを受ける場合があります。

### 重要

- ・本体は水洗いしないでください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
- ・ジェルパッドは必ず清潔な手で取り扱ってください。


### 本体のお手入れ

- ①本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
- ②30～40℃程度のぬるま湯に中性洗剤を少量（3～5%程度）入れたものを柔らかい布に湿らせ、固く絞ってから表面の汚れを丁寧にふき取ってください。
- ③水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭き取ってください。
- ④風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

### ジェルパッドのお手入れ方法

ジェルパッドの粘着面（ジェル面）が汚れて貼りつきにくくなったら、下記の手順でお手入れしてください。

- ①指先に水滴をつけてジェルパッドの粘着面（ジェル面）をこすり、汚れを取り除いてください。
- ②十分に水をきって、粘着面（ジェル面）を上にし風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- ③表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてから、本体を台紙に貼り付けてください。

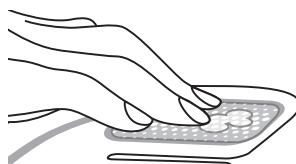


### ジェルパッドの取り外し方

めくるようにゆっくりとジェルパッドを剥がします。

- ・電極部に残ったジェルは全て取り除いてください（剥がしたジェルパッドに、残ったジェルのかけらを付着させると、簡単に取り除けます）。





ジェルパッドを取り外すときは本品の電源を切ってください。痛みややけどのおそれがあります。

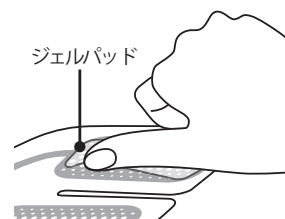

### ご注意

- ・長時間、頻繁にお手入れをしないでください。粘着面（ジェル面）が傷んで寿命が短くなるおそれがあります。


## 充電方法（全ての家庭用のUSBアダプターで充電できます。）

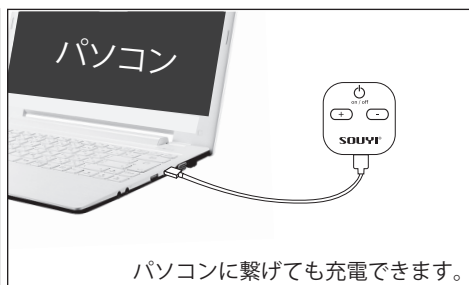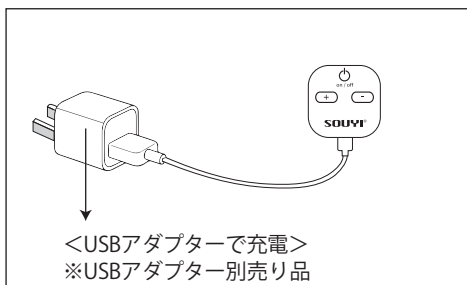



## 保管方法

### 1 台紙に貼る。

- ・本体を折り曲げるなどして、ジェルパッド同士を接触させないでください。
- ・台紙に強く押し付けしないでください。粘着面（ジェル面）が傷むおそれがあります。
- ・専用の台紙にイラスト通り貼付けるときれいに収納できます。

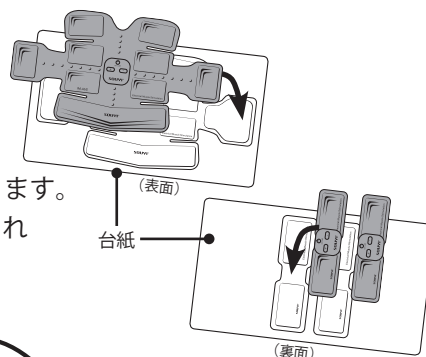

### 2 収納袋に入れる。

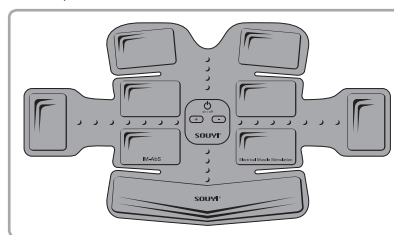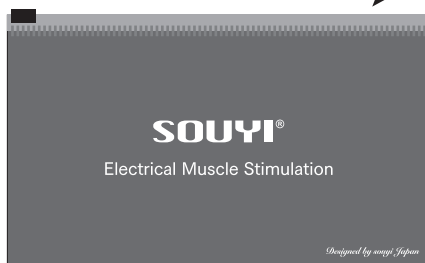

#### ご注意

- ・台紙・収納袋は清潔に保ってください。 ・高温・多湿の場所（車中など）を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- ・湿気の少ないところに保管してください。 湿気が原因で本体内部で結露やサビが発生する原因になります。
- ・使用しない時は、つまづいてケガをしないよう、安全な場所で保管してください。
- ・ちいさなお子様の手の届くところやペットの近くに保管しないでください。 ・火気の近くで保管しないでください。

## 廃棄方法

- ・各自治体が指定している破棄方法に従ってください。
- ・長期使用にともない、本体に傷や亀裂が入った場合は使用を中止し廃棄してください。

## Q&A

**Q1** 毎日使用しても大丈夫ですか？

**A1**

毎日ご使用できます。ただし1箇所につき1日1回(20分以内)までとしてください。同じ箇所への繰り返しの使用は筋肉疲労を起こすおそれがあるためお控えください。また、身体や肌に異常を感じた場合はただちに使用を中止し、医師に必ず相談してください。

**Q2** 浴室で使用してもよいですか？

**A2**

使用しないでください。本製品は防水仕様ではございません。

**Q3** どのレベルを使えばよいですか？

**A3**

初めてお使いになるときは弱いレベルに設定して使用してください。弱いレベルに慣れましたら、レベルの調整を行ってください。

**Q4** 使用できない部位や、使用できない場合はありますか？

**A4**

首から上の部位(頭、顔など)、背骨(脊髄)、胸部および肩甲骨などの心臓周辺部位には使用しないでください。また、心臓に疾患がある場合は使用しないでください。詳しくは、P.1「安全上のご注意」を参照してください。

**Q5** 妊娠中や出産直後に使用してもよいですか？

**A5**

使用しないでください。産後・授乳中の方は、かかりつけの医師にご相談ください。

**Q6** 睡眠中に使用できますか？

**A6**

睡眠中は使用しないでください。

**Q7** 本品を使用して筋肉に痛みは生じるものですか？

**A7**

他のトレーニングと同じで、筋肉痛が生じる可能性があります。筋肉痛がある場合は、使用をお控えいただくか、レベルを下げて使用してください。

**Q8** ジェルパッドの交換時期はいつですか？

**A8**

P.4に記載されている「ジェルパッドの取り扱い方法」を参照してください。

**Q9** 電極部が黒くなってきましたが、支障はありませんか？

**A9**

支障はありません。使用回数や使用状況により電極部が黒く変色することがあります。これは電極材質の変色によるものです。カビや汚れのような不衛生なものではなく、また、本品の性能を劣化させるものではありません。

## 故障かな？と思ったら

| 状態             | 考えられる原因                          | 対処方法                                                  |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 電源が入らない        | 充電がされていない。                       | 付属のケーブルにて充電する。                                        |
|                | 操作部を押す時間が短い。                     | 「ピー」の音が鳴るまで、電源ボタンを長押し(2秒)する。                          |
|                | 低温・高温の環境下で使用した。                  | 推奨使用環境温度(10～35℃)で使用する。                                |
| 「ピッ、ピッ」という音がする | ジェルパッドが肌に密着していない。                | 全てのジェルパッドを肌に密着させる。                                    |
|                | 電池残量が少なくなっている。                   | 充電をする。                                                |
| 電気刺激を感じない      | 電源が入っていない。                       | 「ピー」の音が鳴るまで、電源ボタンを長押し(2秒)する。                          |
|                | ジェルパッドが肌に密着していない。                | 全てのジェルパッドを肌に密着させる。                                    |
|                | ジェルパッドの粘着面(ジェル面)が傷んでいる。          | P.4「ジェルパッドの取り扱い方法」を参照して、新しいジェルパッドに交換する。 <sup>*1</sup> |
|                | ジェルパッドの粘着面(ジェル面)がゴミやホコリなどで汚れている。 | P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、ジェルパッドを清掃する。                 |
| 電気刺激が弱い        | レベル設定が低い。                        | +ボタンを押し、レベルを上げる。                                      |
|                | 電池残量が少なくなっている。                   | 充電をする。                                                |
|                | ジェルパッドの粘着面(ジェル面)が傷んでいる。          | P.4「ジェルパッドの取り扱い方法」を参照して、新しいジェルパッドに交換する。               |
|                | ジェルパッドの粘着面(ジェル面)がゴミやホコリなどで汚れている。 | P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、ジェルパッドを清掃する。                 |
| 電気刺激が強い        | レベル設定が高い。                        | 電源ボタンを長押し(2秒)して、電源を切る。その後、再度電源を入れ、レベルを選びなおす。          |
|                | ジェルパッドが肌に密着していない。                | ジェルパッドと肌の間に隙間がないように貼り付ける。                             |
| 電気刺激が途中で止まる    | 電池残量がない。                         | 充電をする。                                                |
| ジェルパッドが貼り付かない  | 粘着面(ジェル面)のフィルム(透明)を剥がしていない。      | フィルム(透明)を剥がす。                                         |
|                | 粘着面(ジェル面)が汚れている。                 | P.10「お手入れ方法」を参照して、お手入れする。                             |
|                | 粘着面(ジェル面)が傷んでいる。                 | P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、ジェルパッドを交換する。 <sup>*1</sup>   |
| 肌が赤くなる・チクチクする  | ジェルパッドが肌に密着していない。                | 全てのジェルパッドを肌に密着させる。                                    |
|                | 粘着面(ジェル面)が汚れたり、乾いたりしている。         | P.10「お手入れ方法」を参照して、お手入れする。                             |
|                | 粘着面(ジェル面)が傷んでいる。                 | P.10「ジェルパッドのお手入れ方法」を参照して、ジェルパッドに交換する。 <sup>*1</sup>   |

\*1 ジェルパッドは消耗品です。別売品をお求めください。詳しくは、P.14「別売品」を参照してください。

その他、異常がある場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または、ソウイジャパン株式会社お客様相談室までお問い合わせください。

## 製品仕様

|              |                                                                              |        |                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 品名           | アクティブ・パッドEMS                                                                 |        |                                       |
| 品番           | SY-081-N                                                                     |        |                                       |
| 重量           | 80g                                                                          |        |                                       |
| サイズ          | 380mm×205mm（アプス10極パッド） 50mm×186mm（シングル2極パッド）                                 |        |                                       |
| 電源           | USB電源充電式                                                                     | 充電時間   | 約1時間                                  |
| 電池の種類        | リチウムポリマー電池3.7V                                                               | 連続使用時間 | 約20分<br>※20分後に自動的に電源が切れます。            |
| 推奨使用<br>環境温度 | 約10～35℃                                                                      | 連続使用回数 | 満充電時：1セットEMSレベル7<br>約20分間使用で約15回可能です。 |
| 材質           | ABS樹脂、PET樹脂、PU樹脂                                                             |        |                                       |
| ヘルツ周波数       | 5～50Hz                                                                       |        |                                       |
| 付属品          | 本体3個、充電用USBケーブル3本、専用貼り付け用ボード1枚（両面用）、<br>収納袋1枚、本体専用PAD14枚（大2枚、小12枚）、取扱説明書兼保証書 |        |                                       |

### Abs-EMS Gel Pad（本体専用 高電導ジェルパッド）

|    |               |
|----|---------------|
| 枚数 | 14枚（大2枚、小12枚） |
| 材質 | アクリル系ポリマー     |

本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

## 別売品


ジェルパッドは消耗品です。粘着面（ジェル面）が傷んだときは、別売品をお求めください。  
純正品以外のジェルパッドを使用すると、以下のトラブルが発生するおそれがあります。

- ・製品本来の性能を発揮できない
- ・製品の一部分が破損し、故障する
- ・刺激を強く感じたり、やけどや肌荒れを起こす

純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

EMS Gel Pad /品番：SY-081-N-PAD  
（本体専用 高電導ジェルパッド）

本体専用PAD14枚（大2枚、小12枚）

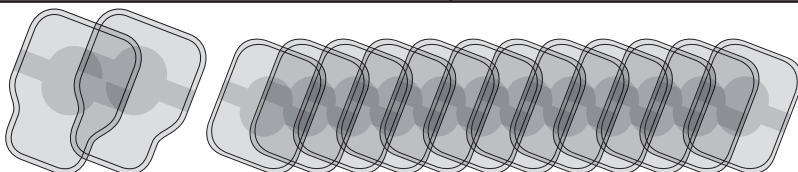

【公式販売サイト】  
ご購入はこちら  
QRコードから



# 保証書

|                                |                      |              |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 品名：アクティブ・パッド EMS               |                      | 品番：SY-081-N  |
| お買い上げ日<br>年 月 日                |                      | 販売店名・住所・電話番号 |
| 保証期間（お買い上げ日から）<br><b>1 年 間</b> |                      |              |
| お客様                            | お名前                  |              |
|                                | 電話番号：                |              |
|                                | ご住所：（〒      ー      ） |              |

※ 購入日を証明するレシートまた送り状などを必ず添付してください。

## 【保証規定】

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、無償修理いたします。修理をご依頼になる場合は、ソウイジャパン株式会社までご連絡ください。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障または損傷
2. お買い上げ後の落下、移動など輸送上の破損および設置時の破損または損傷
3. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷など天災地変による故障または損傷
4. 指定以外の電源電圧を加えたことによる故障または損傷
5. 一般の家庭以外（業務用または業務用に近い長時間の使用）で使用した場合の故障または損傷
6. 保証書の提示がない場合
7. 保証書にお客様、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
8. ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による故障または損傷
9. 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合

本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お客様の個人情報は、本製品にかかわる業務においてのみ利用します。第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

● 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

お客様サポートセンター  **0570-003-688**

※ 上記番号がご利用いただけない場合 03-6431-8328

受付時間：月曜日～金曜日（祝日および弊社の休日を除く）10：00～17：30

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-24-4 タキゲンビル10F

メールでのお問い合わせ：info@souyi-japan.com

ホームページ： <http://www.souyi-japan.com>

ソウイジャパン株式会社